

## ∴ HEINE OMEGA 500 Breath Shield - Reinigung und Desinfektion



- ∴ Wir empfehlen eine Reinigung und Desinfektion nach jeder Anwendung.
- ∴ Wenn Sie ein anderes Desinfektionsmittel verwenden als wie von uns empfohlen, kann HEINE Optotechnik nicht für die Materialbeständigkeit garantieren.
- ∴ Der Anwender muss sich überzeugen, ob das Desinfektionsmittel für den Einsatz bei dem HEINE Breath Shield geeignet ist und die erforderliche Wirksamkeit hat.
- ∴ Beachten Sie die Angaben der Hersteller der Aufbereitungsmittel (z.B. Anwendungsdauer, etc.).
- ∴ Nehmen Sie das Breath Shield vom Ophthalmoskop ab.
- ∴ Wählen Sie ein geeignetes Desinfektionstuch, z.B.:  
Wasserstoffperoxid (z.B. Incidin OxyWipe oder PREempt Wipes) oder  
Alkohol + Quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Super Sani Cloth)
- ∴ Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie das Breath Shield zuerst mit einem mit Reinigungsmittel getränkten Tuch reinigen, bevor Sie es desinfizieren, z.B. Spülmittellösung oder enzymatisch (z. B. neodisher MediClean).
- ∴ Wischen Sie das Breath Shield vollständig und mit der angegebenen Einwirkzeit des Herstellers mit dem Desinfektionstuch ab.
- ∴ Wenn Rückstände zu sehen sind, wischen Sie mit einem mit Wasser getränkten Tuch nach und trocknen Sie das Breath Shield mit einem trockenen sauberen Tuch ab.
- ∴ Überprüfen Sie das Breath Shield vor der erneuten Nutzung auf Schäden oder Verunreinigungen. Wenn Sie Schäden oder nicht entfernbare Verunreinigungen feststellen, darf das Breath Shield nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden.
- ∴ Desinfizieren Sie das Produkt vor der Entsorgung. Es sind die jeweils landesspezifischen Entsorgungsregeln zu beachten.